
Умная ушная палочка Xiaomi Bebird M9 Pro

Руководство пользователя



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: алюминий, поликарбонат, медицинский силикон

Подключение: Wi-Fi

Необходимое ПО: bebird

Совместимость: iOS 8.0 / Android 4.3 и последующие версии

Аккумулятор: 350 мАч

Время работы: 90 мин

Время зарядки: 1.5 ч

Артикул производителя: M9 Pro

Габариты упаковки: 190 x 90 x 67 мм

Вес в упаковке: 350 г

Страна-производитель: КНР

Использование

Магнитная зарядка

При прямом размещении - установке ушной палочки эндоскопом вверх происходит зарядка. Во время зарядки световой индикатор горит зеленым цветом

Хранение ушной палочки

При установке ушной палочки эндоскопом вниз зарядка не осуществляется. Данное размещение подходит для хранения устройства

Хранение насадок

Насадки для ушной палочки можно хранить в подставке-базе. Поверните крышку против часовой стрелки для открытия контейнер.

Чистка

Палочка предназначена для очищения уха от ушной серы, для освещения уха во время удаления инородных предметов, для осмотра на предмет возникновения ушных заболеваний.


1. Перед применением вставьте один из выбранных наконечников.
2. Аккуратно погружая насадку в ухо, выполняйте чистку ушных раковин.
3. Снимите насадку с прибора и промойте ее в мыльном растворе.

Примечание: Не допускается повторное использование не очищенной насадки.

Подключение



1. Для управления устройством через мобильное приложение скачайте и установите приложение Vebird.
2. Зарядите палочку. Возьмите устройство в руки и снимите крышку. Магнитный датчик автоматически включит палочку.
3. В списке доступных устройств найдите модель M9 Pro. В связи с постоянным обновлением приложения и ПО фактический список действий для подключения может отличаться, поэтому следуйте подсказкам на экране смартфона.

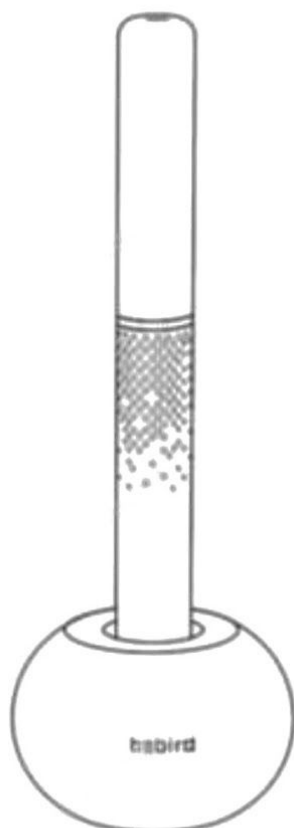

Примечание! Устройство необходимо подключить к смартфону по Wi-Fi.

Меры предосторожности

- Устройство предназначено для бытового применения;
- Используйте устройство только по его прямому назначению;
- В случае повреждения устройства не пользуйтесь им, так как это может привести к травмам;
- Храните устройство вдали от детей;
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство;
- После использования протирайте корпус устройства мягкой сухой тканью;
- Не погружайте корпус прибора в воду или другую жидкость;
- После каждого использования очищайте прибор;
- Для очистки насадок снимите их с прибора, промойте в мыльном растворе;
- Не используйте для очистки агрессивные жидкости и/или абразивные чистящие средства;
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте;
- Если продукт не используется долгое время, он также должен заряжаться не менее 1 раза в месяц;
- При использовании температура продукта слегка повышена (около 35 градусов), пожалуйста, будьте осторожны при использовании;
- Рекомендуемый период эксплуатации для насадок – 6 месяцев.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Умная ушная палочка Xiaomi Bebird M9 Pro

База-подставка с магнитной зарядкой

Мягкая ложечка — 5 шт.

Твердая ложечка — 2 шт.

Игольчатая массажная палочка — 3 шт.

Спиртовые палочки — 3 шт

Поролоновая насадка — 4 шт.

Документация